



**Mederilab**<sup>®</sup>

## **CLORHEXIN SOLUCION CONCENTRADA**

NUMERO DE REGISTRO Q-1190-040

Solución concentrada  
Desinfectante

### **FÓRMULA:**

Cada ml contiene:

Gluconato de Clorhexidina..... 40 mg

Vehículo c.b.p.....1 ml

### **USO EN:**



### **INDICACIONES:**

Desinfectante concentrado destinado a la limpieza de instalaciones, equipos e instrumental médico. Cuenta con acción bactericida, fungicida y viricida. Cuenta con acción sobre materia orgánica, como pus y sangre.

### **MECANISMO DE ACCION:**

A concentraciones bajas su acción es bacteriostática y a concentraciones altas tiene un poder bactericida rápido. El proceso letal está relacionado con una serie de cambios citológicos y fisiológicos relacionados, algunos de los cuales son reversibles, y que culminan con la muerte de la célula.

La secuencia es la siguiente: Atracción rápida hacia la célula bacteriana. Adsorción específica e intensa a ciertos compuestos que contienen fosfato en la superficie bacteriana. Alteración de los mecanismos de la pared bacteriana. Atracción hacia la membrana citoplasmática. Dispersión de los componentes citoplasmáticos de bajo peso molecular e inhibición de enzimas unidas a la membrana citoplasmática como el adenosiltrifosfato. Precipitación de componente del citoplasma por la formación de complejos con radicales fosfatados, como adenosintrifosfato y ácidos nucleicos.

### **FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA:**

Posee una acción residual duradera, permaneciendo químicamente activa de 5-6 horas.

### **DOSIS:**

Disuelva 75 ml por cada litro de agua limpia. Administrar la dilución y dejar actuar durante 10 minutos. Enjuagar con agua y dejar secar.

### **TOXICIDAD Y EFECTOS ADVERSOS:**

Debido a que se aplica en instalaciones, equipos e instrumental médico no existen efectos adversos.

### **INTERACCIONES:**

No usar en combinación ni después de la aplicación de ácidos, sales de metales pesados o yodo.

### **ADVERTENCIAS:**

Mantenga el envase perfectamente cerrado.

Puede ser riesgoso si se ingiere.

Almacene el producto en un lugar fresco y seco.

En caso de contacto con los ojos, enjuague abundantemente con agua.

No se exponga a la luz solar.

No se deje al alcance de los niños.

### **PRESENTACIONES:**

Frasco con 1 litro.

Garrafa con 4 litros.

### **USO VETERINARIO CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

Información de uso exclusivo para el Médico Veterinario

HECHO EN MÉXICO POR:  
MEDERI LAB S.A.P.I. DE C.V.  
Tel. (33) 10 28 36 76  
[www.mederilab.com](http://www.mederilab.com)